

Líquido para enxaguar canais radiculares

**ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTE INSTRUÇÕES**  
PRODUTO PARA USO EXCLUSIVO DE DENTISTAS**COMPOSIÇÃO:** hipoclorito de sódio (teor de cloro ativo 5,25%), água de pureza farmacopêica.**FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO**

Remove os restos de polpa morta durante o alargamento mecânico do canal. Limpa o canal, incluindo a remoção da camada "smear layer" para expor os orifícios do túbulo dentinário antes de preencher o canal.  
Previne a descoloração dos dentes, que pode ocorrer após o preenchimento de um canal não enxaguado.

**Adaptador com tampa de rosca para coletar o produto para a seringa**

1. Desenrosque a tampa do frasco.
2. Enrosque o adaptador no frasco.
3. Para usar, remova a tampa azul, enrosque a extremidade da seringa na abertura do adaptador, incline o frasco com o produto de cabeça para baixo e colete o líquido para a seringa, segurando o adaptador. Em seguida, coloque o frasco na posição vertical sobre a mesa e retire suavemente a seringa com o líquido do adaptador. Recomenda-se o uso de seringas Luer-Lock com êmbolo de borracha.
4. Após cada utilização, feche o adaptador com a tampa azul.
5. Para transportar, remova o adaptador e enrosque a tampa do frasco.

**MODO DE USO**

Introduza o CHLORAXID 5,25% no canal usando uma seringa com agulha com orifício lateral. Enxaguar abundantemente os canais, na quantidade de cerca de 10 ml de líquido por 1 canal. O hipoclorito de sódio contido no produto terá inativação imediata ao entrar em contato com uma substância orgânica. À medida que a concentração de hipoclorito de sódio diminui, o tempo de enxague deve ser estendido e o volume da solução usado deve ser aumentado.

**CONTRAINDICAÇÕES**

Não usar CHLORAXID 5,25% em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.

**ATENÇÃO!** Ao enxaguar os canais radiculares, use uma solução salina fisiológica entre os enxagues com hipoclorito de sódio e digluconato de clorexidina, que evita a formação de um precipitado marrom. Enxaguar com abundância.

**PRECAUÇÕES!**

Ao enxaguar o canal radicular, não use jatos fortes de líquido, pois isso pode fazer com que o líquido penetre nos tecidos periapicais e cause danos, manifestados por dor ou inchaço dos tecidos moles. Tome cuidado especial ao utilizar o produto durante perfurações. Pode causar queimaduras na pele e lesões oculares graves. Em caso de contato, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico. Se ingerido, não forçar o vômito. Beber muita água. Consultar um médico. O uso de enscadeira é obrigatório durante o trabalho. Equipamento de proteção individual (óculos, máscara de proteção, luvas) também deve ser usado.

**O DISPENSADOR NÃO PODE SER USADO PARA ARMAZENAR LÍQUIDOS!**

Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

**ARMAZENAMENTO**

Conserva na embalagem original a uma temperatura de 2-8 °C (no frigorífico). Armazene em um recipiente bem fechado. Proteja da luz solar. Mantenha fora do alcance das crianças. O prazo de validade está na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

**TRANSPORTE**


O fabricante permite que o produto seja transportado por não mais de 10 dias a uma temperatura não superior a 40 °C. O transporte a curto prazo dentro da gama de temperaturas especificada não afeta a segurança e a eficácia do produto ao longo da sua vida útil.

**PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS**

As embalagens utilizadas devem ser descartadas ou devolvidas ao fabricante.

**EMBALAGEM DISPONÍVEL**

Frasco com 200 g ou 400 g de produto, adaptador com tampa de rosca, dispensador.

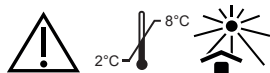

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel/fax 0048 15 842-35-85