

Material para preenchimento e reconstrução de canais radiculares

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTE INSTRUÇÕES
PRODUTO PARA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS DENTISTAS

COMPOSIÇÃO:

MTA+ powder: óxido de cálcio e óxidos de: silício, ferro, alumínio, sódio, potássio, bismuto, magnésio, zircónio, fosfato de cálcio.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

O produto destina-se a ser utilizado durante o tratamento dentário como material para o preenchimento e remineralização de canais radiculares. Após ser misturado com água, endurece passados 6 a 10 minutos. Tem um efeito remineralizante nos tecidos dentários, graças ao alto teor de iões de cálcio. As ligas de cálcio-silício suportam a restauração do tecido após a perfuração da parede e a reabsorção intracanal. O *MTA+* está indicado especialmente em casos de:

- perfuração das paredes de canais radiculares,
- reabsorção intracanal,
- preenchimento da face posterior da raiz,
- aquando do revestimento direto da polpa dentária,
- durante amputação da polpa,
- no tratamento de dentes com desenvolvimento radicular incompleto.

O *MTA+* não deve ser utilizado como preenchimento único e permanente do canal radicular.

MODO DE USO

Cortar a parte superior da pipeta com o rótulo *MTA+ liquid*. Colocar o conteúdo de todo o frasco de vidro com o rótulo *Bio MTA+ powder* e 1 a 2 gotas de *MTA+ liquid* na placa de mistura.

Mexer cerca de 30 segundos até obter uma consistência de areia molhada. Se o material for demasiado espesso ou frágil, adicionar outra gota do líquido (ou água destilada). Colocar o produto no local seleccionado utilizando o aplicador.

O contacto com a humidade ou sangue acelera a ligação do produto. A embalagem de *MTA+ powder* contém uma dose de utilização única.

Depois de misturar com o líquido *MTA+ liquid* (ou água destilada), a dose preparada deve ser utilizada no máximo em 10 minutos. Após este tempo, ocorre o endurecimento da massa obtida. A embalagem de *MTA+ liquid* deve ser utilizada no prazo de 12 meses após a abertura.

CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto. Não utilizar o produto em caso de inflamação, uma vez que o pH ácido interfere com a ligação do *MTA+*.

PRECAUÇÕES

O produto pode causar danos no olho.

Irritante para as membranas mucosas da boca e dos olhos. Em caso de contacto, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico. Se ingerido, não forçar o vômito. Beber muita água.

Consultar um médico. Ao trabalhar com o produto é necessário utilizar um dique de borracha, luvas descartáveis e óculos de protecção.

Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original a temperaturas até 25 °C. Proteger contra a humidade.

Manter fora do alcance das crianças.

O prazo de validade para utilização encontra-se na embalagem primária.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS

As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGEM

Frasco de vidro contendo 0,14 g de pó *MTA+ powder*, pipeta contendo 1 ml de líquido *MTA+ liquid*.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
 37-450 Stalowa Wola, Polska
 ul. Kwiatkowskiego 1
 Tel/fax 0048 15 842-35-85